

# Корректор осанки МЕК 2004 (S,M,L,XL,XXL) бежевый/серый

## **Описание:**

- корректор изготовлен из воздухопроницаемого гипоаллергенного материала;
- снабжен четырьмя металлическими ребрами жесткости;
- можно использовать как на одежду, так и непосредственно на тело;
- легкий, незаметный под одеждой, комфортный в использовании;
- разведение верхнего плечевого пояса осуществляется при помощи плечевых лямок, степень натяжения которых самостоятельно регулируется благодаря разъёмной конструкции изделия;
- анатомическая форма делает использование корректора максимально безопасным и комфортным;
- универсальность конструкции позволяет осуществлять индивидуальный подбор изделия;
- не сковывает движения;
- легкий, незаметный под одеждой, комфортный в использовании;
- цвет: бежевый, серый.

## **Функции:**

- формирование правильной осанки;
- реклинация и разгрузка грудного отдела позвоночника;
- нормализация мышечного тонуса;
- активация работы мышц спины.

## **Показания к применению:**

- различные формы нарушения осанки, сутулость;
- боли различной этиологии в области грудного отдела позвоночника;
- остеохондропатии грудного отдела позвоночника с болевым синдромом;
- кифотическая и сколиотическая деформации позвоночника I-II степени;
- ушибы, миозиты и межреберные невралгии в грудном отделе.

## **Противопоказания:**

- абсолютных противопоказаний не выявлено;
- Относительные противопоказания (требуют консультации врача):
- дерматологические заболевания кожи в области применения бандажа;
  - аллергические реакции, гиперчувствительность, непереносимость сырья;
  - нарушение целостности кожных покровов, открытые раны в области использования бандажа;
  - сколиоз III-IV степени;

- осложненные травмы позвоночника с повреждением спинного мозга;
- необходимость индивидуального ортезирования позвоночника;

применять изделие под контролем и по назначению врача.

**Инструкция по применению:**

- для правильного подбора изделия воспользуйтесь размерной таблицей, предварительно измерив окружность грудной клетки;
- корректор рекомендуется надевать на нижнее белье;
- наденьте корректор на плечи;
- зафиксируйте спереди нижнюю эластичную ленту;
- расположите плечевые ленты на спине буквой Х;
- отрегулируйте степень натяжения лент и зафиксируйте застежкой.
- степень фиксации определяется врачом
- длительность ежедневного использования определяется лечащим врачом

Таблица размеров:

<i>Размер изделия</i>	<i>Окружность грудной клетки, см</i>
<b>S</b>	70,0-80,0
<b>M</b>	80,0-90,0
<b>L</b>	90,0-100,0
<b>XL</b>	100,0-110,0
<b>XXL</b>	110,0-120,0

**Рекомендации по уходу:**

- перед стиркой застегните все липучки;
- рекомендуется ручная стирка при температуре воды не выше 30 градусов с использованием мягких моющих средств. Не отбеливать, не кипятить;
- сушить на плоскости в расправленном состоянии вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, не гладить утюгом,
- сухая чистка запрещена.

**Состав:**

- полиэфир 63%,
- латекс 28%,
- полиамид 9%.
- ребра: алюминиевый сплав.

**Хранение:**

Хранение изделия должно осуществляться в упаковке изготовителя в сухих, проветриваемых помещениях в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей.

Срок хранения – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.

*Гарантийными случаями не являются:*

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.