

Ортез для фиксации шейного отдела позвоночника МЕК Филадельфия 1003 (S,M,L)

Описание:

- изготовлен из гипоаллергенного, водостойкого, плотного EVA-материала;
- легко saniруется;
- состоит из двух частей в соответствии с анатомическими особенностями головы и шеи;
- имеет отверстие над трахеей;
- фиксация бандажа и регулировка осуществляется с помощью застежки «Велкро»;
- дополнительно усилен пластиковыми элементами для жесткости изделия;
- размер - в зависимости от высоты и окружности шеи;
- цвет: бежевый.

Функции:

- жесткая стабилизация и фиксация шейного отдела позвоночника и головы;
- разгрузка тел шейных позвонков и мышечно-связочного аппарата шеи;
- нормализация кровообращения;
- уменьшение явлений воспаления и активация восстановительных процессов в шейном отделе позвоночника.

Показания к применению:

- травмы шейного отдела позвоночника;
- лечение изолированных переломов остистых и поперечных отростков шейных позвонков, тяжелых повреждений мышечно-связочного аппарата шеи;
- стабильные неосложненные переломы тел позвонков и при комбинированных травмах шейного отдела позвоночника;
- реабилитация после оперативных вмешательств по поводу травм, новообразований и другой патологии шейного отдела позвоночника и мягких тканей шеи;
- профилактика образования тянущих рубцов после ожогов шеи;
- корешковый синдром при остеохондрозе шейного отдела позвоночника;
- нестабильность в шейном отделе позвоночника.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания (требуют консультации врача):

- дерматологические заболевания кожи в области применения бандажа;
- аллергические реакции, гиперчувствительность, непереносимость сырья;
- нарушение целостности кожных покровов, открытые раны в области использования бандажа;

- не рекомендуется надевать изделие сразу после нанесения на кожу согревающей мази или крема;

Применять изделие под контролем и по назначению врача.

Инструкция по применению:

- измерить высоту и окружность шеи для правильного подбора размера изделия;
- приложить заднюю половину бандажа к задней поверхности шеи;
- переднюю половину бандажа приложить к передней поверхности шеи таким образом, чтобы подбородок оказался в специальном углублении;
- боковые стороны передней половины бандажа наложить поверх боковых поверхностей задней половины;
- фиксирующей лентой с застежками «Велкро» закрепить бандаж на шее, чтобы он плотно прилегал к поверхности тела;
- не следует фиксировать бандаж слишком плотно (во избежание сдавления прилегающих сосудов и нервов, а также образования гематом);
- время ношения бандажа определяется лечащим врачом.

Таблица размеров:

Размер изделия	Окружность шеи, см
S	25,4 - 33,0
M	33,0 - 40,6
L	40,6 - 48,3

Рекомендации по уходу:

- обрабатывать слабым мыльным раствором;
- сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей;
- не отбеливать, не кипятить, не применять средства, содержащие хлор;
- сушить на плоскости в расправленном состоянии вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, не гладить утюгом;
- сухая чистка запрещена.

Состав:

- 70% пластиковая пена, 20% полипропилен,
- 10% нейлон, пластик.

Хранение:

Хранение изделия должно осуществляться в упаковке изготовителя в сухих, проветриваемых помещениях в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей.

Срок хранения – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.