

**С заботой  
о твоём  
теле!**



**Массажер «2 в 1»  
КТ-5961**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Общие сведения.....                       | 4  |
| Комплектация .....                        | 5  |
| Устройство массажера «2 в 1».....         | 5  |
| Подготовка к работе и использование ..... | 6  |
| Чистка и обслуживание .....               | 10 |
| Уход и хранение.....                      | 10 |
| Устранение неполадок .....                | 10 |
| Технические характеристики .....          | 12 |
| Меры предосторожности.....                | 13 |

## Общие сведения

Массажер «2 в 1» КТ-5961 позволит провести воздушно-компрессионный массаж рук и роликовый массаж шейно-воротниковой зоны, спины и ног.

Воздушно-компрессионный массаж помогает снизить усталость, болевые ощущения и снять напряжение в кистях, а также уменьшить онемение или отек пальцев рук. Прессотерапия (лимфодренаж, пневмомассаж) способствует расслаблению мышц и снятию спазмов и зажимов в мышечной ткани, она направлена на стимуляцию циркуляции лимфы и крови. Помимо прессотерапии за счет специального рельефа воздушных подушек проводится точечный массаж акупунктурных точек ладони. Воздействие на конкретные биологически активные точки на ладонях помогает улучшить обмен веществ и нормализовать работу внутренних органов, поэтому проведение массажа рук может благоприятно влиять на весь организм.

В приборе предусмотрено 3 режима воздушно-компрессионного массажа. Сила сжатия (интенсивность давления) регулируется для комфортного проведения массажа. Режим нагрева улучшает микроциркуляцию для более глубокого массажа, делает кожу рук нежной и гладкой. Три уровня нагрева позволяют выбрать подходящую для вас температуру. Устройство имеет три режима вибрации, которая способствует лучшему расслаблению перенапряженных мышц. Интенсивность вибрации настраивается.

Массаж рук будет особенно полезен тем, кто занимается длительной механической работой и подвергает руки высокой или длительной монотонной нагрузке, например офисным сотрудникам, музыкантам или домохозяйкам.

Массажер «2 в 1» КТ-5961 выполняет массаж роликами, помогая снять усталость, напряженность и расслабить мышцы как тем, кто ведет сидячий образ жизни, так и тем, кто испытывает физические нагрузки, например спортсменам после тренировки.

Давление роликами на мышцы во время массажа усиливает циркуляцию крови, в результате чего ткани получают больше кислорода и питательных веществ. Сеансы массажа положительно влияют на состояние костно-мышечной системы. Они повышают эластичность мышечных волокон. Роликовый массаж помогает восстановить нормальную работу лимфотока, что оказывает общее детоксикационное воздействие. Роликовый массаж можно включить вместе с инфракрасным нагревом. Благодаря этому эффективность массажа повышается и достигается лучшее расслабление мышц. Массажер можно использовать для роликового массажа шеи, лопаток, поясницы, бедер и голеней.

Прибор имеет автоматическое отключение после 15-минутного сеанса.

За счет небольшого веса и работы от аккумулятора массажер можно использовать в любом удобном для вас месте и брать с собой в поездки.

Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Перед использованием прибора обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». Массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.

Данное устройство не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.




## Комплектация

1. Массажер с заглушкой разъема для зарядки — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство массажера «2 в 1»

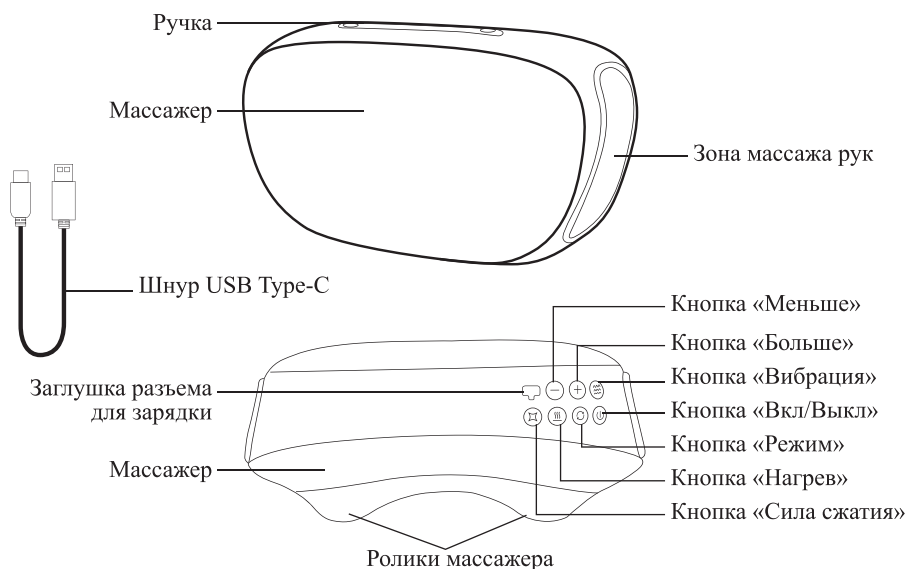

**Кнопка «Вкл/Выкл»** включает и выключает устройство. Для включения и выключения устройства необходимо нажать и удерживать 3 секунды данную кнопку. После включения массажера нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» включает и выключает роликовый массаж, а также переключает режимы роликового массажа:

- индикатор кнопки «Вкл/Выкл» горит синим цветом — устройство включено, роликовый массаж отключен;
- индикатор кнопки «Вкл/Выкл» горит красным цветом — включен роликовый массаж;
- индикатор кнопки «Вкл/Выкл» горит фиолетовым цветом — включен роликовый массаж с инфракрасным нагревом.

**Кнопка «Режим»** включает и выключает воздушно-компрессионный массаж, а также переключает режимы воздушно-компрессионного массажа:

- индикатор кнопки «Режим» горит синим цветом — включен 1 режим: циклический массаж левой и правой руки;

- индикатор кнопки «Режим» горит красным цветом — включен 2 режим: циклический массаж левой и правой руки, но с большим временем сжатия руки;
- индикатор кнопки «Режим» горит фиолетовым цветом — включен 3 режим: одновременный массаж правой и левой руки;
- индикатор кнопки «Режим» не горит — воздушно-компрессионный массаж отключен.

После включения воздушно-компрессионного массажа загорается **кнопка «Сила сжатия»**, которая циклично переключает силу сжатия (интенсивность давления) во время массажа рук. Цвет индикатора кнопки «Сила сжатия» показывает, какая сила выбрана: синий — минимальная, красный — средняя, фиолетовый — максимальная.

**Кнопка «Нагрев»** включает и выключает нагрев в зоне массажа рук, а также переключает уровни нагрева. Цвет индикатора кнопки «Нагрев» показывает, какой уровень выбран: синий — минимальный (35 °C), красный — средний (40 °C), фиолетовый — максимальный (45 °C). Нагрев осуществляется с тыльной стороны ладони.

**Кнопка «Вибрация»** включает и выключает вибрацию в зоне массажа рук, а также переключает режимы вибрации. Вибрация работает с паузами. Режимы вибрации отличаются продолжительностью вибрации и паузы. Цвет индикатора кнопки «Вибрация» показывает, какой режим вибрации выбран: синий — минимальное время работы вибрации, красный — среднее время работы вибрации, фиолетовый — максимальное время работы вибрации.

**Кнопками «Больше» и «Меньше»** настраивается интенсивность вибрации. Всего вибрация имеет 5 уровней интенсивности.

Нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом.

Через 15 минут работы срабатывает автоотключение: массажер выключается, индикация гаснет.

**Примечание.** Нагрев и вибрация в зоне массажа рук, воздушно-компрессионный массаж и роликовый массаж работают независимо друг от друга.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте массажер из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус сухой мягкой тканью. Не помещайте массажер в воду или под струю воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C.

Перед использованием зарядите аккумулятор.

### Зарядка аккумулятора

Установите массажер на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола. Откройте заглушку разъема для зарядки и подключите шнур USB Type-C к устройству, а затем к источнику питания. Для зарядки устройства используйте блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: 5 В, 1,5 А (в комплект не входит). Также вы можете заряжать устройство через компьютер или пауэрбанк.

Аккумулятор можно заряжать с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Время полной зарядки составляет 2–3 часа. Во время зарядки индикатор кнопки «Вкл/Выкл» мигает красным цветом. Когда устройство полностью заряжено, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» горит синим непрерывно.

**Внимание!** Во время зарядки устройство нельзя включить.

После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства. Плотно закройте заглушку разъема для зарядки.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С. Если устройство перевозится или доставляется до места эксплуатации в зимний период, то перед зарядкой следует подождать, пока устройство нагреется до комнатной температуры.

Храните прибор при температуре от 0 до 40 °С. Если устройство не используется в течение длительного времени, то заряжайте его наполовину каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

## Использование

### *Роликовый массаж*

1. Перед выполнением массажа убедитесь, что кожа чистая. Если у вас длинные волосы, соберите их так, чтобы они не мешали. В зоне массажа не должно быть посторонних предметов: украшений, молний, швов или декоративных элементов одежды. Одежда должна быть удобной и не стесняющей движения.
2. Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить устройство. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» загорится синим цветом.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить роликовый массаж. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» загорится красным цветом.
4. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» второй раз, чтобы включить роликовый массаж с инфракрасным нагревом. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» загорится фиолетовым цветом.
5. Поместите массажер на любую из зон, приведенных ниже на рисунке.



Шея



Голени



Поясница



Лопатки



Бедра

6. Один сеанс массажа длится 15 минут. По истечении времени сработает автоотключение: массажер выключится, индикация погаснет. Чтобы выключить роликовый массаж раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» третий раз. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» загорится синим цветом.
7. Если вы выключили роликовый массаж раньше автоматического отключения, то нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить устройство. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» погаснет.

### *Воздушно-компрессионный массаж*

1. Снимите все аксессуары: кольца, часы, браслеты. Убедитесь, что кожа рук чистая, или используйте одноразовые полиэтиленовые перчатки.
2. Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить устройство. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» загорится синим цветом.

3. Для включения нагрева нажмите на кнопку «Нагрев». Индикатор нажатой кнопки загорится синим цветом — включен минимальный уровень нагрева. Нажмите второй раз на данную кнопку, чтобы переключить на средний уровень нагрева. Индикатор нажатой кнопки загорится красным цветом. Третье нажатие на кнопку «Нагрев» включит нагрев на максимальном уровне. Индикатор нажатой кнопки загорится фиолетовым цветом. Следующее нажатие на кнопку «Нагрев» выключит нагрев. Индикатор нажатой кнопки погаснет.

**Примечание.** Нагрев производится сверху, вы ощутите его тыльной стороной рук. Потребуется подождать несколько минут, прежде чем вы почувствуете заметное повышение температуры.

4. Для включения вибрации нажмите на кнопку «Вибрация». Индикатор нажатой кнопки загорится синим цветом — включена вибрация с минимальным временем работы вибрации. Нажмите второй раз на данную кнопку, чтобы увеличить время работы вибрации. Индикатор нажатой кнопки загорится красным цветом. Третье нажатие на кнопку «Вибрация» включит вибрацию с максимальным временем работы. Индикатор нажатой кнопки загорится фиолетовым цветом. Следующее нажатие на кнопку «Вибрация» выключит вибрацию. Индикатор нажатой кнопки погаснет. Нажимайте на кнопки «Больше» и «Меньше», чтобы изменить интенсивность вибрации.
5. Нажмите на кнопку «Режим», чтобы включить воздушно-компрессионный массаж рук. Индикатор кнопки «Режим» загорится синим цветом (включен 1 режим). Нажмите на кнопку «Режим» второй раз, чтобы выбрать 2 режим. Индикатор нажатой кнопки загорится красным цветом. Третье нажатие на кнопку «Режим» включит 3 режим. Индикатор нажатой кнопки загорится фиолетовым цветом. Четвертое нажатие на кнопку «Режим» выключит воздушно-компрессионный массаж. Индикатор кнопки «Режим» гаснет.
6. По умолчанию включена максимальная сила сжатия (интенсивность давления). Индикатор кнопки «Сила сжатия» горит фиолетовым цветом. Нажмите на кнопку «Сила сжатия», чтобы изменить силу сжатия на минимальную. Индикатор нажатой кнопки загорится синим цветом. Нажмите на кнопку «Сила сжатия» еще раз, чтобы выбрать среднюю силу сжатия. Индикатор нажатой кнопки загорится красным цветом. Нажатие на кнопку «Сила сжатия» циклично меняет интенсивность давления во время массажа рук.

**Примечание.** Рекомендуется начинать воздушно-компрессионный массаж с минимальной интенсивности, постепенно увеличивая ее.

7. Поместите руки в устройство так, чтобы ладони были расположены на выпуклых частях внутри массажера. Не кладите пальцы друг на друга. Расслабьте руки.

**Примечание.** Не пытайтесь вынуть руки во время воздушно-компрессионного массажа, дождитесь, когда воздух в воздушных подушках будет спущен, после этого вы легко освободите руки.

8. Один сеанс массажа длится 15 минут, далее сработает автоотключение: массажер выключится, индикация погаснет. Если вы хотите выключить массажер раньше, то нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Вкл/Выкл». Индикация погаснет.

**Примечание.** Нагрев и вибрация в зоне массажа рук, воздушно-компрессионный массаж и роликовый массаж работают независимо друг от друга.

**Внимание!** Не используйте массажер во время занятий, требующих высокой концентрации внимания и быстрой реакции, например во время управления транспортным средством.

Не используйте массажер более 30 минут подряд. По истечении этого времени сделайте перерыв на 30 минут для охлаждения устройства.

**Меры предосторожности по применению**

1. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению:
  - инфекционные и грибковые заболевания кожи;
  - острые суставные боли воспалительного характера;
  - псориаз или атопический дерматит на руках и запястьях;
  - тромбофлебит, варикоз;
  - нарушения целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
  - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
  - обострение хронических заболеваний;
  - онкология;
  - травмы, переломы;
  - остеопороз;
  - наличие электронных устройств, например кардиостимулятора при заболевании сердца;
  - протезы из металла в зоне воздействия;
  - гипертония;
  - грипп, ОРВИ, повышенная температура;
  - почечная недостаточность;
  - сахарный диабет;
  - гипогликемия;
  - слабость, нервозность;
  - переутомление.
4. Необходимо использовать массажер с особой осторожностью в случаях:
  - беременности;
  - нечувствительности к нагреву;
  - чувствительной кожи.
5. Детям до 12 лет разрешается пользоваться устройством только в присутствии взрослых.
6. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль, то прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, обратитесь к врачу.

**Советы**

После воздушно-компрессионного массажа на руках останутся следы, это нормально. Следы исчезнут в течение часа.

Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Ощущение покалывания является нормальным во время любого вида массажа. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, уменьшите интенсивность.

Для более глубокого ухода за кожей рук нанесите крем, наденьте одноразовые полиэтиленовые перчатки и проведите сеанс массажа.

Используя одноразовые полиэтиленовые перчатки, вы сможете содержать в чистоте тканевое покрытие массажера.

## **Чистка и обслуживание**

Протирайте корпус слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Для чистки тканевого покрытия массажера допускается использовать влажные салфетки, слегка влажную ткань или губку. Допускается использовать небольшое количество мягкого моющего средства для удаления пятен с массажера. Не используйте агрессивные химические средства. После очистки дайте массажеру высохнуть естественным путем. Не сушите массажер на солнце. Не используйте массажер, если он влажный.

Не помещайте массажер в воду или под струю воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C.

Перед использованием массажера убедитесь, что кожа чистая. Необходимо поддерживать чистоту тканевого покрытия массажера, т.к. стирка массажера невозможна.

## **Уход и хранение**

Перед тем как убрать массажер на хранение, очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и уберите в коробку или пакет, чтобы защитить от пыли. Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. Храните устройство при температуре от 0 до 40 °C в сухом месте, недоступном для детей.

При длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости аккумулятора. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого зарядить его примерно наполовину в течение 1–1,5 часов. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в три месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и выйти из строя.

## **Устранение неполадок**

### **Устройство не включается, индикация не горит**

| Возможная причина                         | Решение                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Недостаточный уровень заряда аккумулятора | Зарядите аккумулятор, как описано в разделе «Зарядка аккумулятора» |

### Массажер выключился во время работы

| Возможная причина                                       | Решение                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Массажер выключился автоматически по истечении 15 минут | При необходимости включите устройство снова                        |
| Аккумулятор разрядился                                  | Зарядите аккумулятор, как описано в разделе «Зарядка аккумулятора» |

### Аккумулятор не заряжается

| Возможная причина                                                                | Решение                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Нет напряжения в сети                                                            | Проверьте наличие напряжения в сети                                        |
| Поврежден шнур USB Type-C                                                        | Замените шнур USB Type-C на исправный                                      |
| Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)                  | Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)              |
| Шнур USB Type-C неплотно подключен к разъему для зарядки или к источнику питания | Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и с источником питания |

### Аккумулятор не держит заряд

| Возможная причина                | Решение                        |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Недостаточное время зарядки      | Полностью зарядите аккумулятор |
| Аккумулятор исчерпал свой ресурс | Обратитесь в сервисный центр   |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).



## Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C  $\approx$  5 В, 1,5 А
2. Мощность: 50 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 11,1 В, 2 А\*ч (22,2 Вт\*ч)
5. Время зарядки: 2–3 ч
6. Время работы: 1,5 ч
7. Тип массажера: воздушно-компрессионный, роликовый
8. Автоотключение: через 15 мин
9. Длина шнура USB Type-C: 1 м
10. Размер устройства: 350 × 215 × 160 мм
11. Размер упаковки: 400 × 176 × 226 мм
12. Вес нетто: 2,3 кг
13. Вес брутто: 2,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход массажера из строя вследствие попадания жидкостей, посторонних предметов или порошкообразных продуктов внутрь корпуса устройства, на органы управления, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.



## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с массажером.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения массажера и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при использовании прибором.
13. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C.
14. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.
15. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
16. При зарядке обеспечьте необходимую вентиляцию вокруг устройства.
17. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от массажера и закройте заглушкой разъем для зарядки.
18. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
20. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению».
21. Данное устройство не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
22. Массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.
23. Не пытайтесь вынуть руку во время массажа, сначала остановите массаж. Когда воздух будет спущен, вы легко освободите руку.
24. Перед использованием прибора снимите все аксессуары: кольца, часы, браслеты. Убедитесь, что кожа рук чистая, или используйте одноразовые полиэтиленовые перчатки.
25. Не используйте массажер во время занятий, требующих высокой концентрации внимания и быстрой реакции, например во время управления транспортным средством.
26. Не используйте массажер более 30 минут подряд. После 30 минут использования сделайте перерыв на 30 минут для охлаждения устройства.

IM-1





**Kitfort**

# Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»  
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети  
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775—56—87  
[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)