


**Получай
удовольствие!**

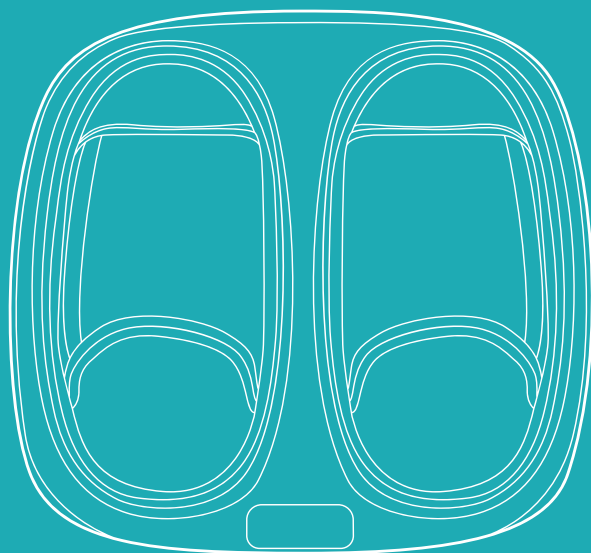

**Массажер для ног
КТ-5930**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство массажера для ног	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	14

Общие сведения

Массажер для ног КТ-5930 выполнит массаж ваших ног и избавит их от усталости. Прибор сочетает в себе воздушно-компрессионный, вибрационный и роликовый массаж, а также нагрев. Все функции можно использовать по отдельности или комбинируя друг с другом. Управление осуществляется с помощью кнопок на панели управления. В данной модели массажера предусмотрен пульт ДУ.

В основе воздушно-компрессионного массажа лежит прессотерапия. Принцип действия прессотерапии основан на подаче сжатого воздуха низкого и высокого давления через манжеты, которые находятся внутри корпуса прибора. Воздействие сжатым воздухом осуществляется с перерывами. Можно настроить интенсивность воздушно-компрессионного массажа.

Прибор сжимает стопы, создавая эффект компрессии, происходит вибрация, массажные ролики воздействуют на акупунктурные точки, при этом осуществляется нагрев.

Предустановленная длительность массажа — 15 минут. По прошествии этого времени массажер автоматически отключится.

Стильный дизайн массажера отлично впишется в любой интерьер.


Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для ног КТ-5930 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.

Комплектация


1. Массажер для ног — 1 шт.
2. Пульт ДУ с отсеком для батарейки и батареей CR2025 — 1 шт.
3. Блок питания — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для ног

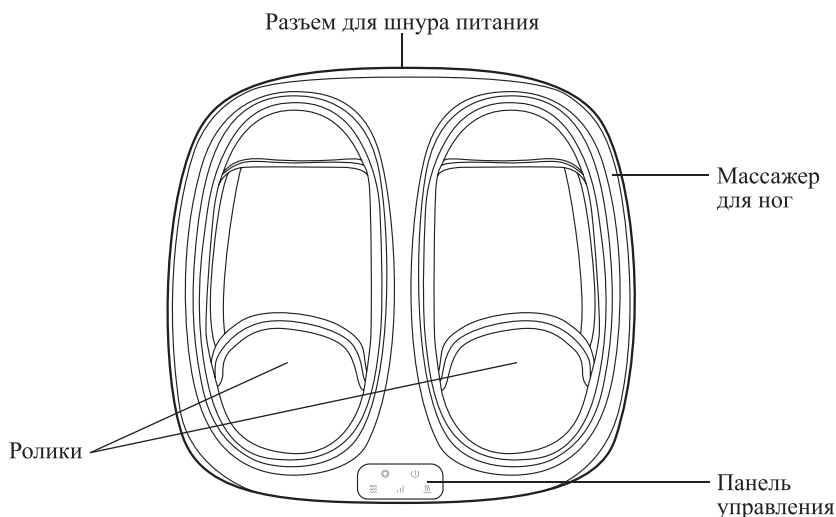

Панель управления

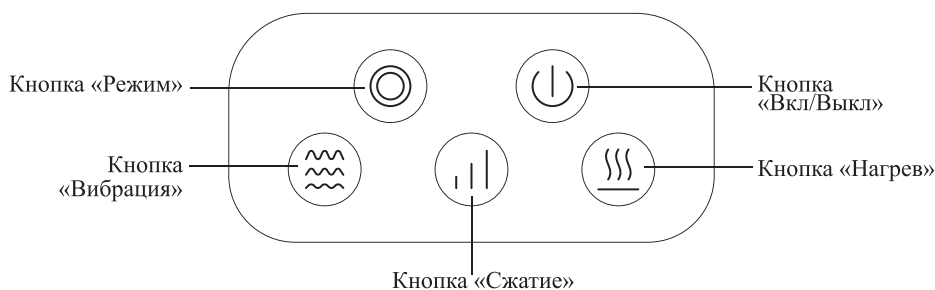

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает массажер. После подключения к сети мигает индикатор, встроенный в кнопку «Вкл/Выкл». Чтобы включить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» один раз. По умолчанию включится первый режим работы: воздушно-компрессионный, роликовый и вибрационный массаж низкой интенсивности, загорятся синим индикаторы, встроенные в кнопку «Режим», «Вибрация», «Сжатие». Также включится нагрев, загорится индикатор, встроенный в кнопку «Нагрев». Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» второй раз, индикатор, встроенный в кнопку, будет мигать. У прибора есть автоматическое отключение через 15 минут работы.

Нажатие на **кнопку «Режим»** циклически переключает режимы массажера:

- первое нажатие включает второй режим работы: воздушно-компрессионный, роликовый и вибрационный массаж средней интенсивности. Индикатор, встроенный в кнопку «Режим» загорится пурпурным;

- второе нажатие включает третий режим работы: воздушно-компрессионный, роликовый и вибрационный массаж высокой интенсивности. Индикатор, встроенный в кнопку «Режим» загорится красным;
- третье нажатие включает первый режим работы: воздушно-компрессионный, роликовый и вибрационный массаж низкой интенсивности. Индикатор, встроенный в кнопку «Режим» загорится синим.


Нажатие на **кнопку «Вибрация»** выключает вибрационный массаж, при этом индикатор, встроенный в кнопку «Вибрация» погаснет. Чтобы включить вибрационный массаж, нажмите на кнопку «Вибрация» еще раз, индикатор, встроенный в кнопку «Вибрация», загорится.

Нажатие на **кнопку «Сжатие»** циклически переключает режимы массажера:

- первое нажатие включает второй режим работы: воздушно-компрессионный массаж средней интенсивности. Индикатор, встроенный в кнопку «Сжатие» загорится пурпурным;
- второе нажатие включает третий режим работы: воздушно-компрессионный массаж высокой интенсивности. Индикатор, встроенный в кнопку «Сжатие» загорится красным;
- третье нажатие выключает воздушно-компрессионный массаж. Индикатор, встроенный в кнопку «Сжатие» погаснет.

Нажатие на **кнопку «Нагрев»** выключает нагрев, при этом индикатор, встроенный в кнопку «Нагрев» погаснет. Чтобы включить нагрев, нажмите на кнопку «Нагрев» еще раз, индикатор, встроенный в кнопку «Нагрев», загорится.

Пульт управления

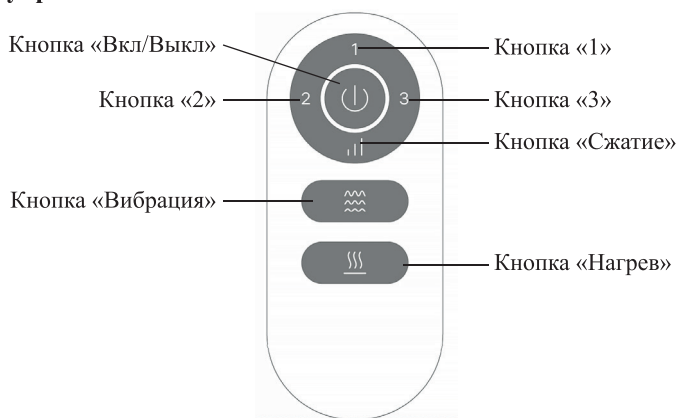

Кнопки пульта управления «Вкл/Выкл», «Вибрация», «Нагрев» и «Сжатие» повторяют функции кнопок панели управления. Описание данных кнопок можно прочитать в разделе «Панель управления».

После включения прибора кнопкой «Вкл/Выкл» нажатие на **кнопку «1»** включает первый режим работы: воздушно-компрессионный, роликовый и вибрационный массаж низкой интенсивности. Индикатор, встроенный в кнопку «Режим» загорится синим.

Нажатие на **кнопку «2»** включает второй режим работы: воздушно-компрессионный, роликовый и вибрационный массаж средней интенсивности. Индикатор, встроенный в кнопку «Режим» загорится пурпурным.

Нажатие на **кнопку «3»** включает третий режим работы: воздушно-компрессионный, роликовый и вибрационный массаж высокой интенсивности. Индикатор, встроенный в кнопку «Режим» загорится красным.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Подключите шнур блока питания к разъему для блока питания на корпусе прибора.

Подключите прибор к сети электропитания, загорится и будет мигать индикатор кнопки «Вкл/Выкл».

Использование

1. Займите удобное положение сидя, расположите стопы в массажере.
2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», по умолчанию массажер начнет работать на первом режиме: воздушно-компрессионный, роликовый и вибрационный массаж низкой интенсивности, загорятся синим индикаторы, встроенные в кнопки «Режим», «Вибрация», «Сжатие». Также включится нагрев, загорится индикатор, встроенный в кнопку «Нагрев».
3. При необходимости выберите другой режим работы массажера с помощью кнопки «Режим». Первое нажатие включает второй режим работы: воздушно-компрессионный, роликовый и вибрационный массаж средней интенсивности. Индикатор, встроенный в кнопку «Режим», загорится пурпурным. Второе нажатие включает третий режим работы: воздушно-компрессионный, роликовый и вибрационный массаж высокой интенсивности. Индикатор, встроенный в кнопку «Режим», загорится красным. Третье нажатие включает первый режим работы: воздушно-компрессионный, роликовый и вибрационный массаж низкой интенсивности. Индикатор, встроенный в кнопку «Режим», загорится синим.
4. При желании вы можете выключить вибрационный массаж. Для этого нажмите на кнопку «Вибрация», индикатор, встроенный в кнопку «Вибрация», погаснет.
5. Можно настроить воздушно-компрессионный массаж с помощью кнопки «Сжатие». Первое нажатие включает второй режим работы: воздушно-компрессионный массаж средней интенсивности. Индикатор, встроенный в кнопку «Сжатие» загорится пурпурным. Второе нажатие включает третий режим работы: воздушно-компрессионный массаж высокой интенсивности. Индикатор, встроенный в кнопку «Сжатие», загорится красным. Третье нажатие выключает воздушно-компрессионный массаж. Индикатор, встроенный в кнопку «Сжатие», погаснет.

6. При желании вы можете выключить нагрев ног. Для этого нажмите на кнопку «Нагрев», индикатор кнопки «Нагрев» погаснет.
Продолжительность массажа составляет 15 минут. По прошествии этого времени массажер автоматически отключится. Чтобы отключить массажер раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
- Примечания.** Не используйте массажер более 15 минут подряд. Это может привести к перегреву массажера и сокращению срока его службы. Перед повторным включением должно пройти не менее 30 минут.
Сеанс массажа для одного человека рассчитан на 15 минут. Увеличение времени сеанса массажа может привести к чрезмерной стимуляции мышц, что может неблагоприятно отразиться на самочувствии человека.
7. Отключите устройство от сети питания, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» погаснет.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским оборудованием и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению:
 - беременность;
 - тромбоз, варикоз;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и т.д.);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств, например, кардиостимулятора при заболевании сердца;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышенная температура;
 - почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;
 - гипогликемия;
 - слабость, нервозность;
 - переутомление;
 - возраст младше 16 лет.
4. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль, прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.

Советы

Не используйте массажер более 15 минут. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день на ногах могут появиться гематомы и болезненные ощущения в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда выключайте массажер и отключайте его от сети. Протирайте корпус прибора и пульт ДУ слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь пульта ДУ и в отсек для батареи.

Не погружайте прибор в воду или под струю воды. Не допускайте попадания жидкостей в корпус прибора, на массажные ролики, на шнур питания или в область панели управления.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на панель управления, на шнур питания.

Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите массажер, пульт управления и блок питания в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур блока питания неплотно вставлен в разъем для блока питания или в розетку	Плотно вставьте штекер блока питания в разъем для блока питания на массажере, затем подключите блок питания к сети



Массажер не работает

Возможная причина	Решение
Массажер подключен к сети, но не нажата кнопка «Вкл/Выкл»	Чтобы включить массажер, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»

Неприятные ощущения во время массажа

Возможная причина	Решение
Установлена высокая интенсивность массажа	Установите низкую или среднюю интенсивность массажа

Пульт ДУ не работает

Возможная причина	Решение
Батарейка села	Откройте отсек для батарейки и замените батарейку CR2025 на новую

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Блок питания:
 - вход: $\sim 100\text{--}240\text{ В}$, 50/60 Гц, 0,8 А
 - выход: $\approx 12\text{ В}$, 3 А
- Мощность: 36 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - массажера: III
- Количество режимов: 3
- Размер стопы: 35–47
- Тип массажера: роликовый, вибрационный, воздушно-компрессионный
- Уровень шума: 65 дБ
- Длина шнура блока питания: 1,5 м
- Размер устройства: $330 \times 360 \times 105\text{ мм}$
- Размер упаковки: $338 \times 180 \times 402\text{ мм}$
- Вес нетто: 3,2 кг
- Вес брутто: 3,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на панель управления, разъем для подключения блока питания, на блок питания, пульт ДУ и в отсек для батарейки не является гарантийным случаем.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа массажера или несоответствующего использования.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур при отключении от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с массажером.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте массажер более 15 минут подряд. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте массажер только на устойчивую горизонтальную поверхность вдали от нагревательных элементов на расстоянии не менее 10 см от стены и других предметов.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения массажера и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на панель управления, на шнур питания.
18. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.
19. Не превышайте максимальное время работы устройства (15 минут). По истечении этого времени сделайте перерыв на 30 минут во избежание перегрева устройства.
20. Достаньте батарейку из пульта управления, если не пользуетесь пультом долгое время.

21. Используйте только батарейку типоразмера CR2025 для пульта управления.
22. Элемент питания для пульта управления является непerezаряжаемым. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87