

**Волшебное
искусство
отдыхать!**



**Массажер для ног
КТ-5911**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство массажера для ног	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	9
Меры предосторожности	10

Общие сведения

Массажер для ног КТ-5911 выполнит массаж ваших ног и избавит их от усталости. Прибор сочетает в себе воздушно-компрессионный и роликовый массаж, а также нагрев. Управление осуществляется с помощью кнопок на панели управления. Есть возможность установить время работы массажера от 5 до 30 минут с шагом 5 минут. После сеанса сработает автоотключение.

В данной модели массажера предусмотрен пульт ДУ.

В основе воздушно-компрессионного массажа лежит прессотерапия. Принцип действия прессотерапии основан на подаче сжатого воздуха низкого и высокого давления через манжеты, которые находятся внутри корпуса прибора. Воздействие сжатым воздухом осуществляется с перерывами.

Встроенные ролики позволяют размять, а также расслабить мышцы. У устройства есть 3 режима, которые отличаются интенсивностью массажа. Разнообразие настроек поможет вам подобрать наиболее комфортный и приятный массаж.

В стопах человека находится множество рефлексогенных зон, фасций и мышц. Прорабатывая их при помощи массажа, можно не только получить приятные ощущения, но и улучшить состояние здоровья в целом. Массаж стоп обладает следующими положительными эффектами: улучшает обменные процессы и процессы регенерации, снимает напряжение, активизирует кровообращение, снимает гипертонус мышц, помогает в борьбе с отечностью. Однако следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Массажер для ног КТ-5911 не является медицинским устройством и используется только в профилактических целях.


Прорезиненные ножки массажера не дают ему скользить по полу. Снизу находятся держатели для шнура, на которые можно смотать излишки шнура электропитания при хранении.

Комплектация


1. Массажер с двумя съемными тканевыми чехлами — 1 шт.
2. Пульт ДУ с отсеком для батарейки и батареей CR2025 — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для ног

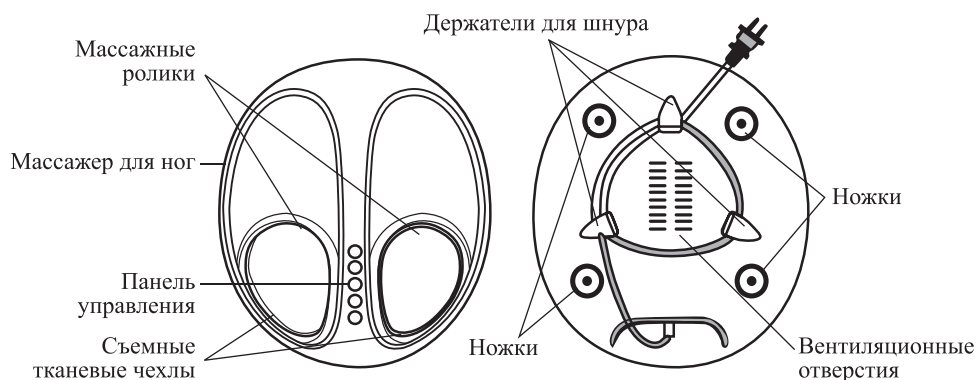

Панель управления

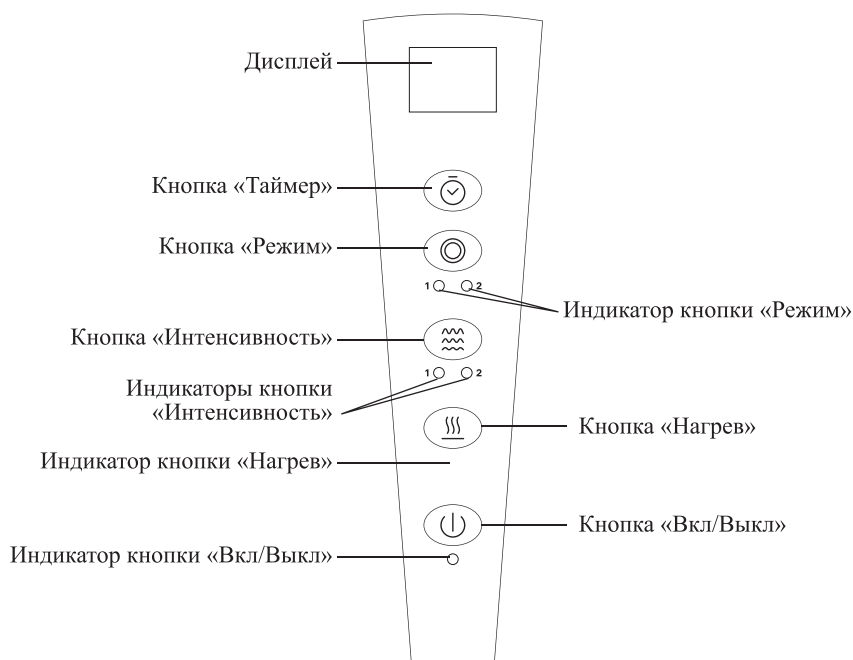

После подключения к сети прибор перейдет в режим ожидания — **индикатор кнопки «Вкл/Выкл»** будет медленно мигать. Чтобы включить массажер, нажмите один раз на **кнопку «Вкл/Выкл»**, на дисплее отобразится время работы по умолчанию — 15 минут, будет установлен первый режим работы, нагрев и низкая интенсивность, загорятся индикатор «Нагрев», левые индикаторы кнопок «Режим» и «Интенсивность».

Нажатие на **кнопку «Таймер»** циклически переключает время работы массажера от 5 до 30 минут с шагом 5 минут. После выбора времени работы на дисплее отображается обратный отсчет.


Нажатие на **кнопку «Режим»** циклически переключает режимы массажера. У массажера 3 режима работы:

- первое нажатие включает второй режим работы: максимальный роликовый массаж, минимальное сжатие. Загорится правый индикатор кнопки «Режим»;
- второе нажатие включает третий режим работы: только сжатие. Загорятся оба индикатора кнопки «Режим»;
- третье нажатие включает первый режим работы: минимальный роликовый массаж, минимальное сжатие. Загорится левый индикатор кнопки «Режим».

Кнопка «Интенсивность» циклически переключает низкую, среднюю и высокую интенсивность массажа. Когда выбрана низкая интенсивность, загорается левый индикатор кнопки «Интенсивность». Когда выбрана средняя интенсивность, загорается правый индикатор кнопки «Интенсивность». Когда выбрана высокая интенсивность, загораются оба индикатора кнопки «Интенсивность».

Чтобы выключить нагрев, нажмите на **кнопку «Нагрев»**, индикатор кнопки погаснет. Температура внутри прибора при включенном нагреве примерно 42 °С.

Пульт управления

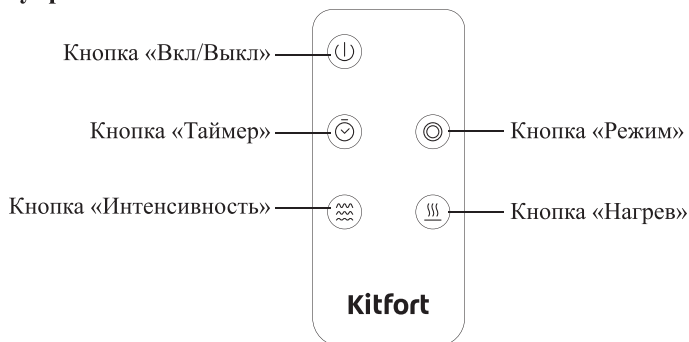

Кнопки пульта управления «Вкл/Выкл», «Таймер», «Интенсивность», «Режим» и «Нагрев» повторяют функции кнопок панели управления. Описание данных кнопок можно прочитать в разделе «Панель управления».

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер и удалите все упаковочные материалы. Снимите съемные тканевые чехлы, отстегнув молнию. Вы можете постирать тканевые чехлы вручную или в стиральной машине при температуре не выше 40°, высушить и вставить обратно в корпус массажера, зафиксировав их молнией. Протрите корпус влажной, затем сухой мягкой тканью.

Расположите массажер на полу так, чтобы ничего не перекрывало вентиляционные отверстия, расположенные на дне устройства. Не устанавливайте массажер на ковер с длинным ворсом.

В пульте управления удалите наклейку с батарейки, потянув за пластиковый язычок в отсеке для батареек.

Подключите шнур питания к сети, прибор перейдет в режим ожидания — индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет медленно мигать.

Использование

1. Сядьте на диван или стул и займите удобное положение. Вставьте ноги в отверстия массажера.

Внимание! Делайте массаж только сидя. Не вставляйте на массажер.



2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», на дисплее отобразится время работы по умолчанию — 15 минут, будет установлен первый режим работы и низкая интенсивность, загорятся индикатор «Нагрев», левые индикаторы кнопок «Режим» и «Интенсивность».
3. Установите время работы массажера от 5 до 30 минут с шагом 5 минут. После выбора времени работы на дисплее отображается обратный отсчет.
4. Нажмите на кнопку «Нагрев», чтобы выключить нагрев стоп, при этом индикатор кнопки «Нагрев» погаснет.
5. Выберите режим работы, нажав на кнопку «Режим». Первое нажатие включает второй режим работы: максимальный роликовый массаж, минимальное сжатие. Второе нажатие включает третий режим работы: только сжатие. Третье нажатие включает первый режим работы: минимальный роликовый массаж, минимальное сжатие.
6. Настройте интенсивность воздушно-компрессионного и роликового массажа, нажав на кнопку «Интенсивность». Когда выбрана низкая интенсивность, загорается левый индикатор кнопки «Интенсивность». Когда выбрана средняя интенсивность, загорается правый индикатор кнопки «Интенсивность». Когда выбрана высокая интенсивность, загораются оба индикатора кнопки «Интенсивность».
7. Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Массажер перейдет в режим ожидания — индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет медленно мигать. Отключите прибор от сети.

Примечание. Если хотите начать новый сеанс, то во избежание перегрева устройства подождите 10–15 минут и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Меры предосторожности по применению

1. Прибор не является медицинским устройством и используется только в профилактических целях.
2. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
3. Существует ряд противопоказаний к применению, таких как:
 - беременность;
 - варикозное расширение вен, тромбофлебит;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (наличие ран, порезов, ожогов и т.д.);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышение температуры;
 - почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;
 - гипогликемия;
 - слабость, нервозность;
 - детский возраст;
 - переутомление.
4. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль в ногах, прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда выключайте массажер и отключайте его от сети. Протирайте корпус прибора слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Не погружайте прибор в воду или под струю воды. Не допускайте попадания жидкостей в корпус прибора, на массажные ролики, на шнур питания или в область органов управления.

Допускается стирать съемные тканевые чехлы вручную при температуре не выше 40 °С. Также их можно стирать в стиральной машине в режиме деликатной стирки при температуре не выше 40 °С. После стирки дайте чехлам высохнуть естественным путем и вставьте их обратно в отверстия массажера, закрепив молнией.

Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Снизу находятся держатели для шнура, на которые можно смотать излишки шнура электропитания. На длительное хранение уберите массажер в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикаторы не горят

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Неприятные ощущения во время массажа

Возможная причина	Решение
Установлена высокая интенсивность массажа	Установите более низкую интенсивность массажа, вы также можете попробовать сменить режим

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 40 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Количество режимов: 3
5. Степени интенсивности: 3
6. Размер стопы: 35–47
7. Тип массажера: роликовый, воздушно-компрессионный
8. Длина шнура: 1,6 м
9. Размер устройства: 430 × 365 × 235 мм
10. Размер упаковки: 440 × 243 × 376 мм
11. Вес нетто: 3,3 кг
12. Вес брутто: 4,5 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзиньхуа Синбу Текнолэджи Ко., Лтд. Билдинг 1, Сяцзе Вилидж, Сяошунь Таун, Цзиньдун Дистрикт, Цзиньхуа Сити, Чжэцзян, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера вследствие попадания жидкостей в массажер, на шнур питания, в область органов управления и не является гарантийным случаем. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате несоответствующего использования.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур блока питания. Не тяните за шнур при отключении от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур блока питания или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с массажером.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте массажер более 15 минут подряд. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте массажер только на устойчивую горизонтальную поверхность вдали от нагревательных элементов на расстоянии не менее 10 см от стены и других предметов. Устанавливайте прибор так, чтобы ничто не мешало доступу воздуха в отверстия, расположенные на дне устройства. Не устанавливайте прибор на ковровые покрытия с длинным ворсом.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения массажера и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Достаньте батарейку из пульта управления, если не пользуетесь пультом долгое время.
18. Используйте только батарейку типоразмера CR2025 для пульта управления.
19. Элемент питания для пульта управления является неперезаряжаемым. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87