


# Время для себя!

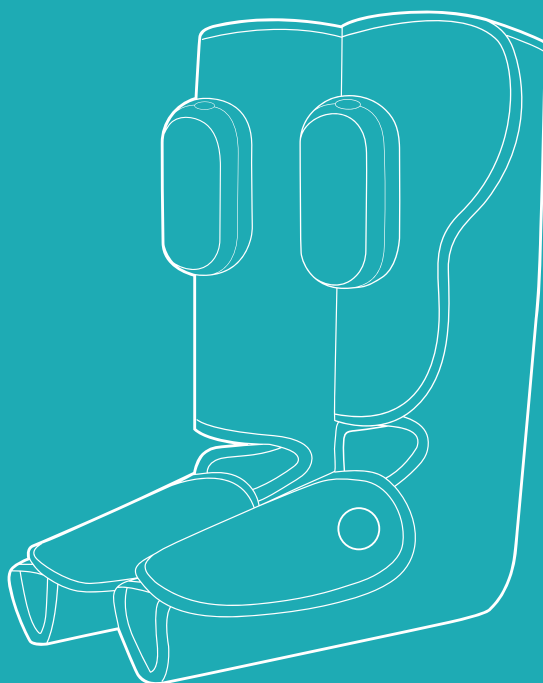

**Массажер для ног  
КТ-5959**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Общие сведения.....                       | 4  |
| Комплектация .....                        | 4  |
| Устройство массажера для ног .....        | 5  |
| Подготовка к работе и использование ..... | 7  |
| Чистка и обслуживание .....               | 9  |
| Уход и хранение.....                      | 10 |
| Устранение неполадок .....                | 10 |
| Технические характеристики .....          | 11 |
| Меры предосторожности.....                | 12 |
| Мобильное приложение Kitfort.....         | 14 |

## Общие сведения

Массажер КТ-5959 поможет снять усталость, уменьшить отеки и расслабить мышцы ног с помощью воздушно-компрессионного массажа (прессотерапии).

Принцип действия прессотерапии основан на подаче сжатого воздуха низкого и высокого давления через манжету. За счет ритмичного сжатия происходит активизация внутренних систем. В итоге застоявшаяся снизу кровь и лимфа начинают двигаться быстрее по венам вверх. Такое воздействие преимущественно направлено на мышечную ткань, поверхностные вены, кожные слои и жировую прослойку, лимфососуды. Процедура способствует улучшению состояния организма.

Проведение массажа улучшает кровообращение, в результате чего ткани получают больше кислорода и питательных веществ. Воздушно-компрессионный массаж помогает восстановить нормальную работу лимфотока, что оказывает общее детоксикационное действие. Сеансы массажа укрепляют сосуды, повышая их тонус. Прессотерапия является профилактической мерой появления варикоза, способствует снижению отека ног и уменьшению объема в области бедер.

Воздушно-компрессионный массаж проводится в области стоп и голеней. Массажер работает в 6 разных режимах. Интенсивность массажа настраивается: минимальная, средняя или максимальная сила сжатия. Через 15 минут работы массажера срабатывает автоотключение.

Для повышения эффективности массажа устройство обладает функциями вибрации и подогрева. Нагрев улучшает микроциркуляцию крови, а вибрация способствует лучшему расслаблению мышц. Нагрев имеет три уровня. Вибрация работает в четырех режимах.

Массажер подойдет как тем, кто ведет сидячий образ жизни, так и тем, кто испытывает физические нагрузки, например спортсменам после тренировки.


Данное устройство не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Если у вас есть какие-либо заболевания, то перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

## Комплектация


1. Массажер для левой ноги с пультом управления — 1 шт.
2. Массажер для правой ноги с пультом управления — 1 шт.
3. Шнур USB Type-C — 2 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство массажера для ног

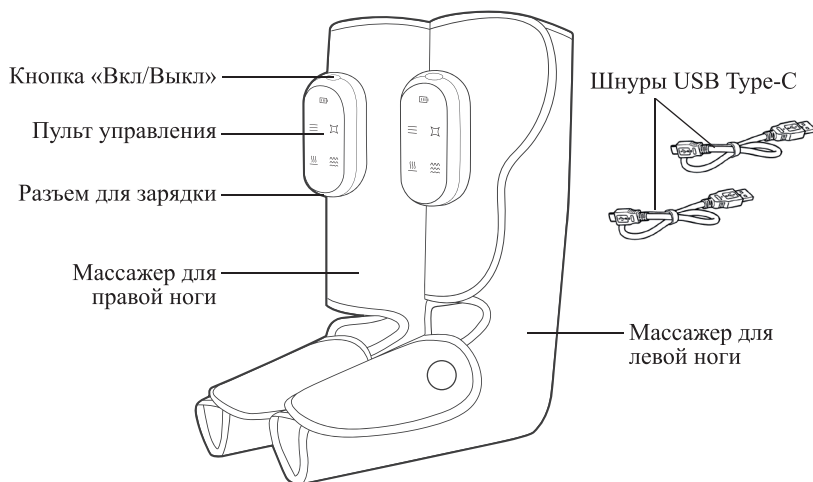

## Панель управления

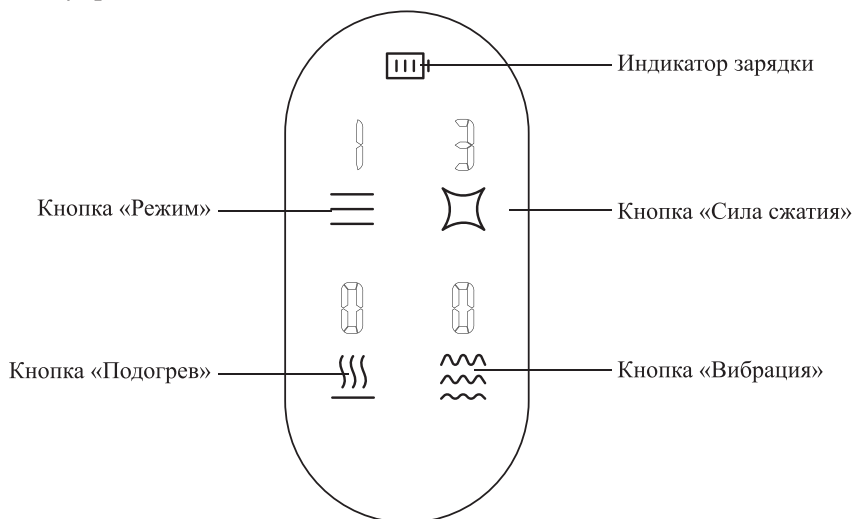

**Кнопка «Вкл/Выкл»** включает и выключает массажер. Нажмите и удерживайте 2 секунды данную кнопку, чтобы включить или выключить устройство. После включения массажер начнет работу с последними заданными параметрами.

**Кнопка «Режим»** циклически переключает режимы работы. На дисплее над кнопкой «Режим» загорается номер выбранного режима работы.

| Номер режима | Схема проведения массажа                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            |    |
| 2            |    |
| 3            |    |
| 4            |    |
| 5            |    |
| 6            |  |

**Кнопка «Сила сжатия»** циклически переключает три уровня силы сжатия (интенсивность массажа). На дисплее над кнопкой «Сила сжатия» загорается номер выбранного уровня:

- 1 — слабая сила сжатия;
- 2 — средняя сила сжатия;
- 3 — сильная сила сжатия.

**Кнопка «Подогрев»** включает подогрев, переключает три уровня подогрева и выключает подогрев. На дисплее над кнопкой «Подогрев» загорается номер выбранного уровня:

- 0 — подогрев отключен;
- 1 — низкий уровень подогрева;
- 2 — средний уровень подогрева;
- 3 — высокий уровень подогрева.

**Кнопка «Вибрация»** включает вибрацию, переключает режимы вибрации и выключает вибрацию. На дисплее над кнопкой «Вибрация» загорается номер выбранного режима вибрации:

- 0 — вибрация отключена;
- 1 — импульсная вибрация;
- 2 — интенсивная вибрация;
- 3 — слабая вибрация;
- 4 — непрерывная вибрация.

Если **индикатор зарядки** горит красным цветом, то необходимо зарядить устройство. Во время зарядки индикатор зарядки мигает белым цветом; когда устройство полностью заряжено, индикатор горит белым непрерывно.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте массажер и удалите все упаковочные материалы. Расправьте массажер. В скрученном или сложенном состоянии включать устройство запрещено. Не зажимайте и не перегибайте массажер.

Перед первым применением ознакомьтесь со всеми рекомендациями и противопоказаниями к применению массажера из раздела «Меры предосторожности по применению».

Зарядите аккумулятор каждого массажера.

### Зарядка аккумулятора

Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, если он рассчитан на ток 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами:  $\pm 5$  В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Вставьте шнур USB Type-C в разъем для зарядки на пульте управления, а затем подключите шнур к источнику питания.

Во время зарядки индикатор зарядки мигает. Когда устройство полностью заряжено, индикатор зарядки горит непрерывно. Время зарядки аккумулятора составляет примерно 2–3 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем заряда. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.


По окончании зарядки сначала отсоедините шнур USB Type-C от источника питания, а затем от массажера.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если массажер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите массажер, затем заряжайте примерно 1–1,5 часа. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

### Использование

1. Массажер для ног нельзя стирать. Поэтому, чтобы сохранить устройство в чистоте, необходимо проводить сеанс массажа в чистых тонких эластичных брюках и носках. На одежде не должно быть никаких выпуклых декоративных элементов, молний, пуговиц и прочего.
2. Закрепите массажер на ногах с помощью липучек, чтобы манжеты плотно прилегали к ногам. Не затягивайте манжеты слишком сильно. Начинайте надевать массажер со ступней и постепенно продвигайтесь вверх. На манжетах есть обозначения: «L» — массажер для левой ноги, «R» — массажер для правой ноги.

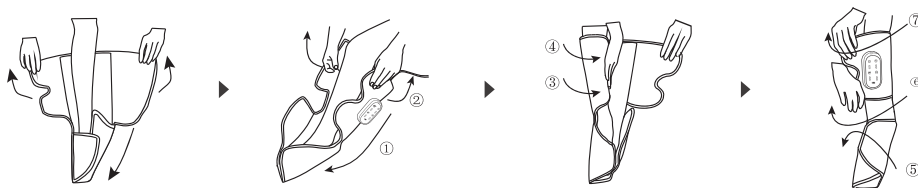

3. Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить массажер. Устройство начнет работу с последними заданными настройками.

**Внимание!** Не вставляйте во время проведения массажа.

4. Нажимайте на кнопку «Режим», чтобы изменить режим работы массажера.
5. Нажимайте на кнопку «Сила сжатия», чтобы настроить силу сжатия при массаже.
6. Нажмите на кнопку «Подогрев», чтобы включить подогрев. Нажимайте на кнопку «Подогрев», чтобы изменить уровень подогрева или выключить его.
7. Нажмите на кнопку «Вибрация», чтобы включить вибрацию. Нажимайте на кнопку «Вибрация», чтобы изменить режим работы вибрации или выключить ее.
8. Один сеанс массажа длится 15 минут, далее сработает автоотключение. Чтобы выключить прибор раньше, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «Вкл/Выкл». Если хотите начать новый сеанс, то во избежание перегрева устройства сделайте перерыв на 10–15 минут перед следующим включением.

**Примечание.** Сеанс массажа для одного человека рассчитан на 15 минут. Увеличение времени сеанса массажа может привести к чрезмерной стимуляции лимфотока и мышц, что может неблагоприятно отразиться на самочувствии человека.

### **Меры предосторожности по применению**

1. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению:
  - беременность;
  - тромбоз, варикоз;
  - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
  - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
  - обострение хронических заболеваний;
  - онкология;
  - травмы, переломы;
  - остеопороз;
  - наличие электронных устройств, например, кардиостимулятора при заболевании сердца;
  - недавняя операция или ввод инъекций;
  - гипертония;
  - грипп, ОРВИ, повышенная температура;
  - почечная недостаточность;
  - сахарный диабет;
  - гипогликемия;
  - слабость, нервозность;
  - переутомление;
  - возраст младше 16 лет;
  - варикоз.
4. Прессотерапия может использоваться в качестве профилактики появления варикоза. На ранней стадии варикоза возможно проведение массажа только после консультации с врачом.
5. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль, прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.

### **Чистка и обслуживание**

Необходимо поддерживать чистоту изделия, т. к. стирка массажеров запрещена.

Перед чисткой убедитесь, что массажер выключен. Подождите, пока массажер полностью сохнет и остынет. При необходимости протирайте массажер слегка влажной мягкой тканью. Допускается использовать небольшое количество мягкого моющего средства для удаления пятен с массажера. Не используйте агрессивные моющие средства. Не скручивайте и не мните изделие во время чистки.



Не сушите массажер на солнце. Не используйте массажер, если он влажный.  
Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на пульт управления и на шнур USB Type-C.

## Уход и хранение

Перед хранением очистите массажер, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Аккуратно сложите массажер без образования каких-либо складок, не скручивайте устройство.

Не кладите тяжелые предметы на прибор во время хранения.

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Храните устройство при температуре от 0 до 40 °С. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство и аксессуары. На длительное хранение уберите устройство в пакет или коробку для защиты от пыли и грязи.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому при длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого заряжать его в течение 1–1,5 часов. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и выйти из строя.

## Устранение неполадок

### Массажер не включается, индикация не горит

| Возможная причина    | Решение                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Аккумулятор разряжен | Зарядите устройство, как это описано в разделе «Зарядка аккумулятора» |

### Устройство не заряжается, индикатор зарядки не горит

| Возможная причина                                                                | Решение                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Нет напряжения в сети                                                            | Проверьте наличие напряжения в сети                                        |
| Поврежден шнур USB Type-C                                                        | Замените шнур USB Type-C на исправный                                      |
| Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)                  | Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)              |
| Шнур USB Type-C неплотно подключен к разъему для зарядки или к источнику питания | Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и с источником питания |

### Массажер перегрелся

| Возможная причина                           | Решение                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вы провели несколько сеансов массажа подряд | Отключите массажер от источника питания и дайте ему остыть. Во избежание перегрева делайте перерыв на 10–15 минут перед проведением следующего сеанса массажа |

### Слишком сильная/слабая интенсивность массажа

| Возможная причина                                           | Решение                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выбрана слишком сильная/слабая сила сжатия во время массажа | Отрегулируйте интенсивность с помощью кнопки «Сила сжатия»                                  |
| Манжеты затянуты слишком сильно/слабо                       | Не затягивайте манжеты слишком сильно. Манжеты должны обхватывать ногу, но не сдавливать ее |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C —5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 2 А\*ч (7,4 Вт\*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Время зарядки: 2–3 ч
6. Время работы: до 1,5 ч
7. Тип массажера: воздушно-компрессионный
8. Количество режимов работы: 6
9. Автоотключение: через 15 мин
10. Длина шнура USB Type-C: 1 м
11. Размер устройства: 270 × 160 × 400 мм
12. Размер упаковки: 325 × 160 × 180 мм
13. Вес нетто: 1,1 кг
14. Вес брутто: 1,5 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение массажера или его составных частей не является гарантийным случаем.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественно-го износа массажера или его несоответствующего использования.

Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов в массажер, пульт управления и шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Массажер не предназначен для общественного использования и применения в медицинских учреждениях.
3. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

4. Перед подключением массажера к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
5. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте массажер, шнур USB Type-C и пульт управления в воду и другие жидкости.
6. Не переносите массажер, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
7. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при использовании прибором.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на шнур USB Type-C и пульт управления.
16. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Во избежание перегрева во время использования никогда не накрывайте массажер и пульт управления чем-либо.
18. Не сворачивайте и не мните массажер во избежание выхода прибора из строя.
19. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.
20. Массажер предназначен только для массажа ног. Не используйте устройство для проведения массажа других частей тела.
21. Не превышайте максимальное время работы устройства (15 минут). По истечении этого времени сделайте перерыв на 10–15 минут во избежание перегрева устройства.

## ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







**Kitfort**

# Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»  
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети  
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775—56—87  
[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)