

ПАСПОРТ

**Генератор спирто-воздушных смесей ручной
«ММ-ГСВСР»**

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения	3
2	Описание и работа	3
2.1	Назначение	3
2.2	Технические характеристики	3
2.3	Состав изделия	4
2.4	Устройство и работа	5
2.5	Маркировка	5
2.6	Упаковка	5
3	Приготовление раствора	5
4	Правила эксплуатации	6
5	Транспортировка и хранение	7
6	Гарантия	7

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий Паспорт совмещен с Руководством по эксплуатации и предназначен для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик генератора спирто-воздушных смесей ручного «ММ-ГСВСР» (далее – генератор «ММ-ГСВСР») и содержит сведения, необходимые для его правильной эксплуатации.

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «МалидиМед»
(ООО «МалидиМед»), Беларусь

Юридический адрес: 211415, Витебская область, г. Полоцк,
пр-т Франциска Скорины, д.14, пом. 32, к. 3

Почтовый адрес: 211415, Витебская область, г. Полоцк, а/я 57

Телефон/факс: +375 44 7200931

E-mail: info@malmed.by

2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

2.1 Назначение

2.1.1 Генератор «ММ-ГСВСР» предназначен для приготовления стандартного образца водного раствора из спиртосодержащей жидкости (с содержанием этилового спирта более 0,4 процента объема готовой продукции) прозрачного цвета (далее – водного раствора), используемого при проведении тестирования паров спиртосодержащей жидкости в выдыхаемом воздухе.

2.1.2 Генератор «ММ-ГСВСР» являются ручным прибором.

2.1.3 Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С: от +15 до +25;
- относительная влажность окружающего воздуха, %: от 30 до 80;

2.2 Технические и метрологические характеристики

2.2.1 Метрологические характеристики генератора «ММ-ГСВСР» приведены в таблице 1.

Таблица 1

Диапазон воспроизведения массовой концентрации , мг/л	Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения массовой концентрации в растворе, %
св. 0,15 до 1,00	±20

2.2.2 Технические характеристики генератора «ММ-ГСВСР» приведены в таблице 2.


Таблица 2

Объем воды, мл	50
Водный раствор термостатируется при комнатной температуре, °С	15-25
Максимальное количество генерируемых проб смеси без замены водного раствора их спиртосодержащей жидкости, в течении 8 ч, проб	20
Габаритные размеры генератора «ММ-ГСВСП»:	
Высота, мм	90
Ширина, мм	75
Масса генератора «ММ-ГСВСП», г	не более 30
Средний срок службы, лет	не более 3

2.3 Состав изделия

2.3.1 Конструктивно генератор «ММ-ГСВСП» состоит из двух частей – крышка (верхняя часть) и емкости для водного раствора (нижняя часть). На верхней части расположены: трубка для подачи воздуха, трубка выхода воздуха, мундштук.

Внешний вид генератора «ММ-ГСВСП» приведен на рисунке 1.

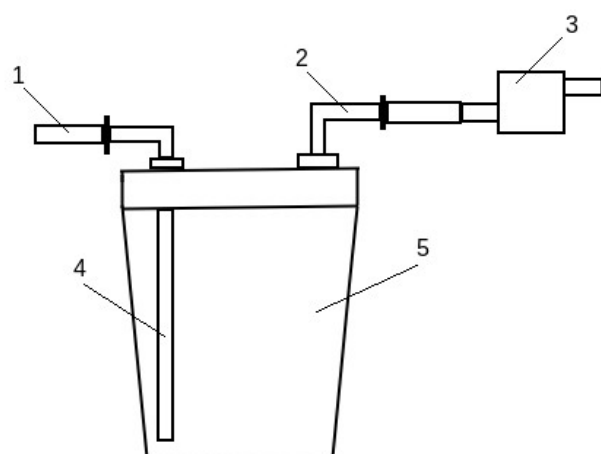

- 1 – мундштук
- 2 – трубка выхода воздуха
- 3 – мундштук квадратный*
- 4 – трубка для подачи воздуха
- 5 – емкость для водного раствора

* – положение мундштука должно соответствовать рисунку 1.

Рисунок 1 – Внешний вид генератора «ММ-ГСВСП»

2.3.2 Комплектность поставки генератора «ММ-ГСВСП» приведена в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество
1	Генератор спирто-воздушных смесей ручной	«ММ-ГСВСП»	1 шт.
2	Мундштук квадратный	—	1 шт.
3	Мундштук	—	100 шт.
4	Шприц	—	1 шт.
5	Паспорт (совмещен с Руководством по эксплуатации)	—	1 экз.

2.4 Устройство и работа

2.4.1 Генератор «ММ-ГСВСПР» является прибором циклического действия.

2.4.2 Принцип действия генератора «ММ-ГСВСПР» основан на барботировании воздуха с постоянным расходом через водный раствор с известным содержанием спиртосодержащей жидкости. При барботировании через водный раствор воздух насыщается парами спиртосодержащей жидкости. Массовая концентрация водного раствора в получаемой смеси на выходе генератора определяется содержанием спиртосодержащей жидкости в используемом водном растворе.

2.5 Маркировка

2.5.1 Маркируется генератор «ММ-ГСВСПР» табличкой со следующей информацией:

- наименование и условное обозначение генератора «ММ-ГСВСПР»: Генератор спирто-воздушных смесей ручной «ММ-ГСВСПР»;
- технические характеристики: объем 100 мл;
- наименование производителя: ООО «МалидиМед»;
- юридический адрес предприятия-производителя: 211415, Витебская область, г. Полоцк, пр-т Франциска Скорины, д.14, пом. 32, к. 3;
- страна производства: Республика Беларусь;
- дата производства и серийный номер, дата производства: день, месяц, год.

2.6. Упаковка

2.6.1 Генератор «ММ-ГСВСПР» упаковывается в картонную коробку.

2.6.2 Комплектующие и эксплуатационные документы упаковываются по отдельности в полиэтиленовые пакеты, в картонную коробку вместе с генератором «ММ-ГСВСПР».

3 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Информация по приготовлению раствора доступна при покупке генератора «ММ-ГСВСПР».

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте следующие условия применения стандартных образцов состава водных растворов:

- ***раствор используйте для однократной заливки в генератор «ММ-ГСВСПР»;***
- ***раствор подлежит замене на новый при превышении максимального количества генерируемых проб без замены водного раствора, указанного в таблице 2 настоящего РЭ, или при нахождении в генераторе более 8 часов;***

– после использования раствор хранению и повторному использованию не подлежит.

4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 С целью обеспечения исправности и готовности к эксплуатации необходимо проводить:

- внешний осмотр;
- чистку генератора «ММ-ГСВСП» по мере загрязнения, промыть водой и просушить;
- обработку мундштук-воронки раствором перекиси водорода 3% или его аналогом;
- обработку иных комплектующих, промыть водой и просушить.

Примечание – Признаками загрязнения являются: налет и слизь на емкости и погруженных в нее элементах, отсутствие пузырьков из некоторых микроотверстий трубки для барботирования воздуха.

ВНИМАНИЕ! Меры безопасности!

– Перед началом эксплуатации генератора «ММ-ГСВСП» внимательно ознакомьтесь с информацией, содержащейся в настоящем паспорте.

– Сохраните данное руководство, оно должно быть доступно для всех пользователей. Соблюдайте все содержащиеся в нем указания.

– Прибор может использоваться только в целях, описанных в данном руководстве.

– Использование генератора «ММ-ГСВСП» детьми запрещено, не разрешайте детям прикасаться к прибору и играть с ним.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Генератор транспортируется в транспортной таре предприятия-изготовителя в крытых транспортных средствах.

5.2 Хранение генераторов должно проводиться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 0 °С до 40 °С.

6 ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты приобретения.