


**Получай
удовольствие!**

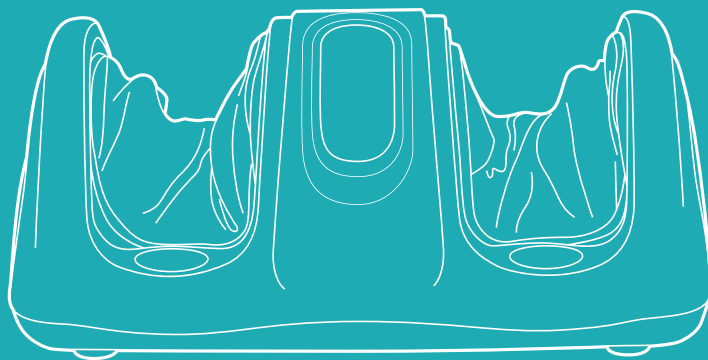

**Массажер для ног
КТ-5914**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство массажера для ног	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	13

Общие сведения

Массажер для ног КТ-5914 поможет снять усталость, уменьшить отеки и расслабить мышцы стоп и икр с помощью роликового массажа. Благодаря нагреву эффективность массажа повышается и достигается лучшее расслабление мышц. Интенсивность массажа настраивается: вы можете выбрать минимальную, среднюю или максимальную интенсивность. Также можно менять направление движения роликов массажера.

В данной модели массажера предусмотрен пульт ДУ.

Предустановленная длительность массажа — 15 минут. По прошествии этого времени массажер автоматически отключится.

В стопах человека находится множество рефлексогенных зон, фасций и мышц. Отдельные зоны стоп имеют взаимосвязь с внутренними органами, системами и позвоночником. С помощью массажера вы можете провести массаж стоп и икроножных мышц. Прорабатывая стопы при помощи массажа, можно не только получить приятные ощущения, но и улучшить состояние здоровья в целом. Массаж улучшает обменные процессы и процессы регенерации, снимает напряжение, активизирует кровообращение, снимает гипертонус мышц, помогает в борьбе с отечностью.

Стильный дизайн массажера отлично впишется в любой интерьер.


Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для ног КТ-5914 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо поврежденных кожи, например, ран, царапин или аллергических высыпаний.

Комплектация


1. Массажер для ног с двумя съемными чехлами — 1 шт.
2. Пульт ДУ с отсеком для батарейки и батареей CR2025 — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для ног

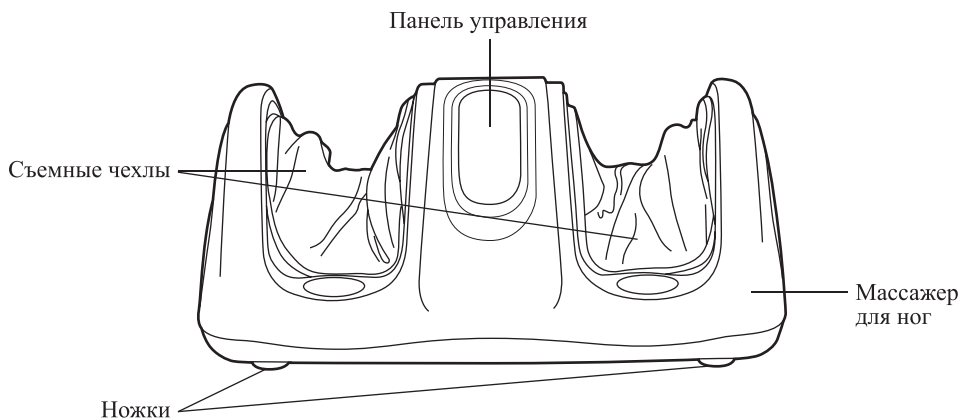

Панель управления

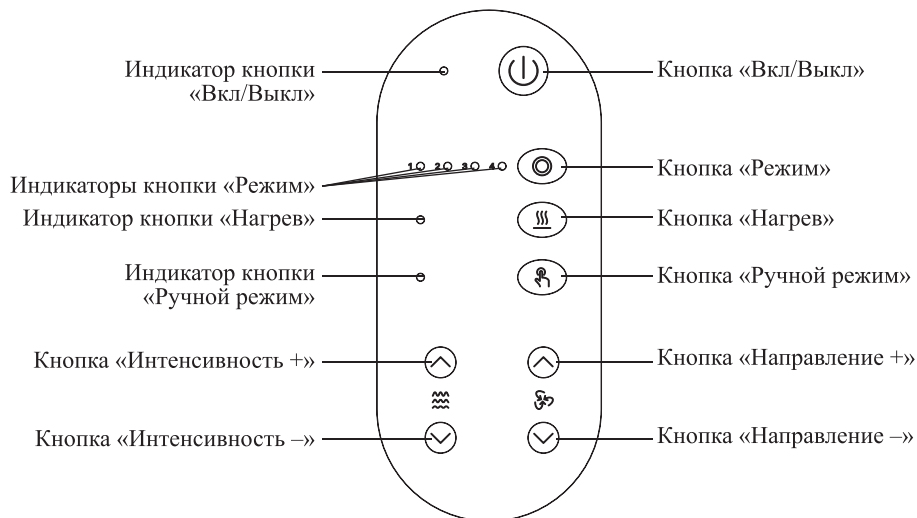

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает массажер. После подключения к сети загорается индикатор кнопки «Вкл/Выкл». Чтобы включить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» один раз, по умолчанию включится первый режим работы: лечебный массаж всей стопы, загорится индикатор «1» кнопки «Режим». Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» второй раз, индикатор кнопки продолжит гореть. У прибора есть автоматическое отключение через 15 минут работы.

Нажатие на **кнопку «Режим»** циклически переключает автоматические режимы массажера:


- первое нажатие включает второй режим работы: массируются точки стопы, связанные с головным мозгом, затылком, шейным и поясничным отделами позвоночника и плечами. Загорится индикатор «2» кнопки «Режим»;
- второе нажатие включает третий режим работы: массируются точки стопы, связанные с кишечником, печенью и желудком. Загорится индикатор «3» кнопки «Режим»;
- третье нажатие включает четвертый режим работы: массируются точки стопы, связанные с репродуктивной и мочевыделительной системами. Загорится индикатор «4» кнопки «Режим».

Нажатие на **кнопку «Нагрев»** включает нагрев, при этом загорается индикатор кнопки «Нагрев». Чтобы отключить нагрев, нажмите на кнопку «Нагрев» еще раз, индикатор кнопки «Нагрев» погаснет.

Чтобы настроить интенсивность массажа и направление роликов, сначала нажмите на **кнопку «Ручной режим»**, загорится индикатор кнопки «Ручной режим». После этого **кнопками «Направление +» и «Направление –»** измените направление движения массажных роликов, а **кнопками «Интенсивность +» и «Интенсивность –»** выберите интенсивность массажа: минимальную, среднюю или максимальную. Чем больше интенсивность, тем быстрее двигаются массажные механизмы.

Примечание. Направление вращения роликов меняется автоматически каждую минуту.

Пульт управления

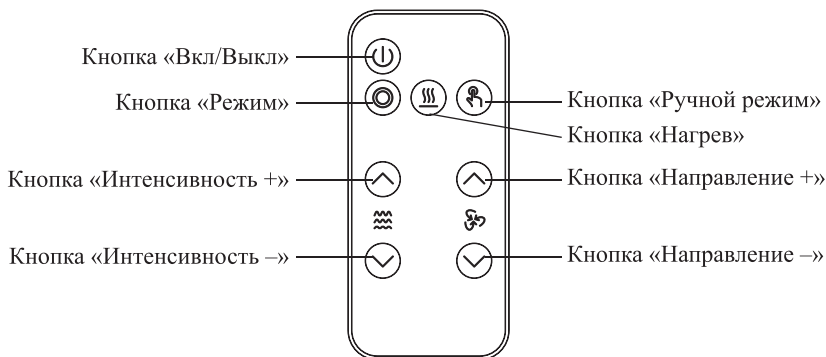

Кнопки пульта управления повторяют функции кнопок панели управления. Описание данных кнопок можно прочитать в разделе «Панель управления».

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью. Подключите прибор к сети, загорится индикатор кнопки «Вкл/Выкл».

Использование

1. Займите удобное положение сидя или лежа. Затем расположите стопы или икры ног на массажере. При желании вы можете сделать массаж предплечий.



2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», по умолчанию массажер начнет работать на первом режиме, загорится индикатор «1» кнопки «Режим». Массажер начнет лечебный массаж всей стопы.
3. При необходимости выберите другой режим работы массажера с помощью кнопки «Режим». Первое нажатие включает второй режим работы: массируются точки стопы, связанные с головным мозгом, затылком, шейным и поясничным отделами позвоночника и плечами. Загорится индикатор «2» кнопки «Режим». Второе нажатие включает третий режим работы: массируются точки стопы, связанные с работой кишечника, печени и желудка. Загорится индикатор «3» кнопки «Режим». Третье нажатие включает четвертый режим работы: массируются точки стопы, связанные с работой репродуктивной и мочевыделительной систем. Загорится индикатор «4» кнопки «Режим».
4. При желании вы можете включить нагрев ног. Для этого нажмите на кнопку «Нагрев», загорится индикатор кнопки «Нагрев». Чтобы выключить нагрев, снова нажмите на кнопку «Нагрев», индикатор кнопки «Нагрев» погаснет.
5. Чтобы настроить интенсивность массажа и направление роликов, сначала нажмите на кнопку «Ручной режим», загорится индикатор кнопки «Ручной режим». После этого кнопками «Направление +» и «Направление -» измените направление движения массажных роликов, а кнопками «Интенсивность +» и «Интенсивность -» выберите интенсивность массажа: минимальную, среднюю или максимальную. Чем больше интенсивность, тем быстрее двигаются массажные механизмы.

Продолжительность массажа составляет 15 минут. По прошествии этого времени массажер автоматически отключится. Чтобы отключить массажер раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечания. Не используйте массажер более 15 минут подряд. Это может привести к перегреву массажера и сокращению срока его службы. Перед повторным включением должно пройти не менее 30 минут.

Сеанс массажа для одного человека рассчитан на 15 минут. Увеличение времени сеанса массажа может привести к чрезмерной стимуляции мышц, что может неблагоприятно отразиться на самочувствии человека.

6. Отключите устройство от сети питания, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» погаснет.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским оборудованием и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению:
 - беременность;
 - тромбофлебит, варикоз;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и т.д.);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств, например, кардиостимулятора при заболевании сердца;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышенная температура;
 - почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;
 - гипогликемия;
 - слабость, нервозность;
 - переутомление;
 - возраст младше 16 лет.
4. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль, прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.

Советы

Не используйте массажер более 15 минут. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день на ногах могут появиться гематомы и болезненные ощущения в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда выключайте массажер и отключайте его от сети. Протирайте корпус прибора слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Не погружайте прибор в воду или под струю воды. Не допускайте попадания жидкостей в корпус прибора, на массажные ролики, на шнур питания или в область панели управления.

Допускается стирать съемные тканевые чехлы вручную при температуре не выше 40 °С. Также их можно стирать в стиральной машине в режиме деликатной стирки при температуре не выше 40 °С. После стирки дайте чехлам высохнуть естественным путем и вставьте их обратно в отверстия массажера, закрепив молнией.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на панель управления, на шнур питания.

Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите массажер, пульт управления и блок питания в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Массажер не работает

Возможная причина	Решение
Массажер подключен к сети, но не нажата кнопка «Вкл/Выкл»	Чтобы включить массажер, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»

Неприятные ощущения во время массажа

Возможная причина	Решение
Установлена высокая интенсивность массажа	Установите низкую или среднюю интенсивность массажа



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 45 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Количество режимов: 5
5. Размер стопы: 35–47
6. Тип массажера: роликовый
7. Уровень шума: 40–48 дБ
8. Длина шнура: 1,3 м
9. Размер устройства: 550 × 310 × 260 мм
10. Размер упаковки: 640 × 385 × 295 мм
11. Вес нетто: 5,2 кг
12. Вес брутто: 6,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзиньхуа Синбу Текнолэджи Ко., Лтд. Билдинг 1, Сяцзе Вилидж, Сяошунь Таун, Цзиньдун Дистрикт, Цзиньхуа Сити, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на панель управления, шнур питания не является гарантийным случаем.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа массажера или несоответствующего использования.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур при отключении от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с массажером.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте массажер более 15 минут подряд. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.



11. Устанавливайте массажер только на устойчивую горизонтальную поверхность вдали от нагревательных элементов на расстоянии не менее 10 см от стены и других предметов.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения массажера и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на панель управления, на шнур питания.
18. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.
19. Не превышайте максимальное время работы устройства (15 минут). По истечении этого времени сделайте перерыв на 30 минут во избежание перегрева устройства.
20. Достаньте батарейку из пульта управления, если не пользуетесь пультом долгое время.
21. Используйте только батарейку типоразмера CR2025 для пульта управления.
22. Элемент питания для пульта управления является непerezаряжаемым. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита KT-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель KT-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов KT-1919

- температура сушки 35–70 °C с шагом 1 °C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа KT-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87